

G-BOND™ TECHNIQUE GUIDE



Prior to use, carefully read the instructions for use. / Vor der Benutzung Anleitung sorgfältig lesen. / Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.



1 APPLICATION
Apply G-BOND™ to entire dried cavity.

AUFTRAGEN
G-BOND™ auf die gesamte, trockene Oberfläche der Kavität geben.

APPLICATION
Appliquer G-BOND™ dans la cavité séchée.



NOTE:

- 1) Shake the bottle.
- 2) Dispense and use immediately.

ANMERKUNG:

- 1) Vor Gebrauch die Flasche schütteln.
- 2) Nach dem Ausbringen sofort verwenden.

NOTE:

- 1) Secouer le flacon
- 2) Prélever et appliquer immédiatement.



2 WAITING
Leave undisturbed for 10 seconds.

WARTEZEIT
10 Sek. lang ruhen lassen.

TEMPS D'ATTENTE
Attendez 10 secondes.



3 DRYING
Dry thoroughly under **MAXIMUM air pressure** for 5 sec. in the presence of vacuum suction.

TROCKNEN
Mit **MAXIMALEM Druck** komplett 5 Sekunden lang bei Absaugereinsatz trocknen.

SECHAGE
Sécher la surface pendant 5 secondes à l'aide d'une seringue à air sous pression **MAXIMALE** et en présence de l'aspiration.



4 LIGHT CURING
Light cure with a visible light curing unit.

LICHTHÄRTEN
Lichthärtung mit sichtbarem Licht.

PHOTOPOLYMERISATION
Photopolymériser avec une unité lumineuse.

G-BOND™ Irradiation Time / Belichtungszeit / Temps d'irradiation

Light curing unit	Halogen / LED	Plasma arc
Distance from (< 10mm)	10 sec.	3 sec.
light guide tip (> 10mm)	20 sec.	6 sec.

G-BOND™ TECHNIQUE GUIDE



Prima de l'utilizzo leggere attentamente le istruzioni. / Antes de usar, leer cuidadosamente las instrucciones de uso. / Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.



1 APPLICAZIONE
Applicare G-BOND™ sull'intera cavità asciugata.

APPLICACIÓN
Aplicar G-BOND™ en toda la cavidad seca.

AANBRENGEN
Breng G-BOND™ aan op de droge caviteit.



NOTE:

- 1) Agitare la bottiglia.
- 2) Erogare e utilizzare immediatamente.

NOTE:

- 1) Agitar la botella.
- 2) Sacar y usar inmediatamente.


- OPMERKING:**
- 1) Schud het flesje.
 - 2) Verdeel en verwerk onmiddellijk.



2 ATTENDERE
Non toccare per 10 secondi.

ESPERAR
Dejarlo sin tocar durante 10 segundos.

INWERKTJID
Gedurende 10 seconden ongestoord laten inwerken.

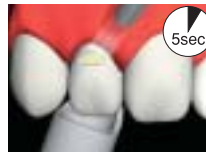

3 ASCIUGARE
Asciugare accuratamente per 5 secondi con la siringa dell'aria alla pressione **MASSIMA** e sotto aspirazione.

SECAR
Secar minuciosamente bajo **MÁXIMA presión de aire** durante 5 segundos, al mismo tiempo succionar al vacío.

DROGEN
Grondig drogen met **MAXIMALE druk** gedurende 5 seconden en tegelijkertijd afzuigen.



4 FOTOPOLIMERIZZARE
Fotopolimerizzare con una lampada a luce visibile.

POLIMERIZACIÓN
Polimerizar con una unidad visible de fotocuración.

LICHTUITHARDING
Belicht met een composietlamp.

G-BOND™ Tempi di irraggiamento / Tiempo de irradiación / Belichtingstijd

Light curing unit	Halogen / LED	Plasma arc
Distance from (< 10mm)	10 sec.	3 sec.
light guide tip (> 10mm)	20 sec.	6 sec.