

INSTRUCTIONS FOR USE (IFU)

MI Paste™



Last revised: 07/2017

6760717

MI Paste™

PASTA TÓPICA CON CALCIO Y FOSFATO BIODISPONIBLES

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar.

ES

Para uso de dentistas o médicos en las indicaciones recomendadas.

DESCRIPCIÓN

MI Paste es una pasta tópica a base de agua que contiene RECALDENT™* (CPP-ACP: Fosfopéptidos de Caseína - Fosfato de Calcio Amorfo). Su mezcla única de limpiadores, pulidores y agentes selladores de los túbulos dentinarios, está diseñada para ser usada por los profesionales del cuidado dental durante las visitas de higiene dental y de profilaxis. Cuando CPP-ACP se aplica en la cavidad oral, este se adhiere a la bio-película, placa, bacterias, hidroxiapatita y tejido blando, liberando localmente el calcio y fosfato biodisponibles.

IMPORTANTE

La saliva aumenta el efecto del CPP-ACP y el sabor ayuda a estimular el flujo de la saliva. Entre más tiempo se mantenga la mezcla del CPP-ACP y la saliva en la boca, más efectivo será el resultado.

INDICACIONES

Para uso en procedimientos de limpieza y pulido dental como parte de los tratamientos de profilaxis realizados por profesionales de la salud. Adicionalmente, MI Paste puede ser usada para controlar la sensibilidad en los dientes y después de tratamientos de raspado, alisado radicular y blanqueamiento.

CONTRAINDICACIONES

RECALDENT™* (CPP-ACP) es un derivado de la caseína, una proteína de la leche. No se use en pacientes con alergias o sensibilidades a la proteína de leche y/o preservativos con hidroxibenzoatos.

INSTRUCCIONES DE USO

I. Aplicación con copa profiláctica

- Después del tratamiento de profilaxis para remover la placa, restos de comida o manchas, pida al paciente que se enjuague la boca.
- Como paso final del tratamiento, aplique una capa generosa de MI Paste en la superficie de los dientes utilizando una copa profiláctica. Pula las superficies. En áreas interproximales de difícil acceso, use un cepillo interproximal.
- Preste atención en aplicar la pasta MI Paste en las superficies cervicales de los dientes, donde se presenta la mayor sensibilidad.
- Pida al paciente que mantenga la pasta MI Paste en su boca (de 1-2 minutos o más si es posible) sin escupir o tragar. Entre más tiempo se mantenga la mezcla de saliva y MI Paste en la boca, más efectivo será el resultado.
- Solicite al paciente no comer ni beber por 30 minutos después del tratamiento.

II. Aplicación con cubeta – Control de la sensibilidad dental

- Lave la cubeta con agua en abundancia.
- Coloque una capa de MI Paste de forma uniforme y abundante en la cubeta y aplíquela en los dientes superiores e inferiores.
- Deje la cubeta fija en la boca del paciente por un mínimo de tres minutos.
- Remueva la cubeta.
- Solicite al paciente que disperse el remanente del MI Paste en su boca usando la lengua. Pida al paciente que mantenga la pasta MI Paste en su boca (de 1-2 minutos o más si es posible) sin escupir o tragar. Entre más tiempo se mantenga la mezcla de saliva y MI Paste en la boca, más efectivo será el resultado.
- Pida al paciente que no enjuague el residuo del MI Paste remanente en la boca e informe que cualquier remanente de MI Paste se puede dejar disipar gradualmente. Solicite al paciente no comer ni beber por 30 minutos después del tratamiento.
- Después del tratamiento, lave y cepille la cubeta con agua en abundancia para remover residuos de MI Paste.

Nota:

Aplicación sin cubeta –

Aplicue una cantidad generosa de MI Paste en las superficies de los dientes y seguir las instrucciones 5 y 6 arriba mencionadas.

SABORES

Fresa (S), Melón (M), Vainilla (V), Menta (I), Tutti-Frutti (T)

ALMACENAJE

Se recomienda para un óptimo desempeño, almacenar en una área de baja humedad, lejos de la luz del sol y entre 8 y 25°C (46,4-77,0°F).

EXPIRACIÓN

Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación. Vea la parte inferior del tubo para la fecha de caducidad.

ENVASE

Tubo con 40 gr (35mL)

NOTA

La formulación única de MI Paste con RECALDENT™ (CPP-ACP) se encuentra disponible únicamente con profesionales de salud. MI Paste™ no está a la venta en farmacias, supermercados y otros establecimientos comerciales.

*CPP-ACP fue desarrollada en el colegio de odontología de: The School of Dental Science, de la Universidad de Melbourne, Victoria, Australia. RECALDENT™ es una marca registrada usada bajo licencia y tiene patentes pendientes en Australia, Nueva Zelanda, Europa, Canadá y EE.UU.

PRECAUCIÓN

- Remueva el exceso de pasta del interior de la tapa y de la rosca del tubo. Siempre cierre el tubo con su tapa después de ser usado.
- En caso de contacto con los ojos lave con agua en abundancia y busque atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la ropa, lave el área afectada con agua.
- En caso de experimentar algún síntoma de angioedema, descontinúe su uso de inmediato y busque atención médica.
- PRECAUCIÓN: RECALDENT™ (CPP-ACP) es derivado de la caseína, una proteína de la leche. No se use en pacientes con alergias o sensibilidad a la proteína de leche y/o preservativos con hidroxibenzoatos.
- En caso de experimentar alguna reacción alérgica, descontinúe su uso inmediatamente, enjuague la boca con agua en abundancia, no trague el contenido, escupa de inmediato, y busque atención médica.

Última revisión: 07/2017

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según SGA.

Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:

<http://www.gcamerica.com/downloads>.

También se pueden obtener con su proveedor.

FABRICADO y DISTRIBUIDO por:

GC AMERICA INC.

3737 W. 127th Street

Alsip, IL 60803 U.S.A.

www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA

Rua Heliadora, 399, Santana - 02022-051

São Paulo, Sp - Brasil

Tel: +55-11-2925-0965

Cnpj: 08.279.999/0001-61

Responsável Técnica Mayara De Santis Ribeiro

Cro/sp: 105.982

PRINTED IN THE USA

IMPRESO EN LOS EE.UU.

6760717

MI Paste™

PASTA TÓPICA COM FOSFATO E CÁLCIO BIODISPONÍVEIS

Leia atentamente estas instruções antes de usar.

PT

Para uso sob a supervisão de médicos ou dentistas nas indicações recomendadas.

DESCRIÇÃO

MI Paste é uma pasta tópica a base de água contendo RECALDENT™ (CPP-ACP: Caseína fosfopéptido-fosfato de cálcio amorfo). Sua mistura única de agentes de limpeza, polidores e selantes dos tubos dentários, é projetada para ser usada por profissionais de odontologia durante as visitas profiláticas e de higiene dental. Quando CPP-ACP é aplicado na cavidade oral, liga-se ao biofilme, placa bacteriana, hidroxiapatita e tecidos moles fixando cálcio e fosfato biodisponíveis.

IMPORTANTE

A saliva aumenta o efeito do CPP-ACP e o sabor ajuda a estimular o fluxo salivar. Quanto mais tempo a mistura MI Paste e saliva permanecerem na boca, mais eficaz será o resultado.

RECOMENDAÇÕES

Para utilização em processos de profilaxias, limpeza e de polimento, como parte de tratamentos dentários realizados por profissionais. MI Paste também pode ser usado para lidar com os dentes sensíveis, pós scaling, alisamento radicular e clareamento.

CONTRAINDICAÇÕES

RECALDENT™ (CPP-ACP) é um derivado da caseína, a proteína do leite. Não utilizar em pacientes com alergias ou sensibilidades à proteína do leite e/ou conservantes com hidroxibenzoatos.

INSTRUÇÕES

I. Aplicação com copo profilático (taça de borracha)

1. Seguindo a rotina de profilaxia para remover a placa bacteriana, restos de comida ou manchas, pedir ao paciente enxaguar a boca.
2. Como parte de revestimento final aplique uma quantidade generosa de MI Paste sobre a superfície dos dentes utilizando copo profilático, uma escova profilática, ou dedo coberto com uma luva. Nas áreas difíceis de alcançar, como entre os dentes, usar escova interproximal.
3. Aplique MI Paste nos dentes, principalmente nas superfícies cervicais onde ocorre maior sensibilidade dentária.
4. Instrua o paciente manter a mistura saliva e MI Paste na boca o maior tempo possível (1-2 minutos ou mais) sem cuspir ou engolir. Quanto mais tempo manter MI Paste em contato com a boca e saliva, mais eficaz será o resultado.
5. Peça para o paciente não comer ou beber nos 30 minutos seguintes ao tratamento.

II. Aplicação com moldeira – Controlar a sensibilidade dentária

1. Antes de aplicar, lave a moldeira cuidadosamente com água em abundância.
2. Coloque uma quantidade de MI Paste na moldeira de forma uniforme e abundante e aplicar nos dentes superiores ou inferiores.
3. Deixe a moldeira fixa na boca do paciente por pelo menos três minutos.
4. Remova a moldeira.
5. Instrua o paciente espalhar o MI Paste remanescente na boca com a língua. O paciente deve manter o MI Paste na boca o maior tempo que puder (1-2 minutos ou mais) sem cuspir ou engolir. Quanto mais tempo o paciente mantiver o MI Paste em contato com a boca e saliva, mais eficaz será o resultado.
6. Peça ao paciente para cuspir. O restante da mistura saliva e MI Paste pode deixar na boca sem enxaguar. O restante de MI Paste na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.
7. Enxugue a moldeira após o uso com água em abundância.

Nota:

Para aplicações sem moldeira –

Aplique uma quantidade generosa de MI Paste sobre as superfícies dos dentes e seguir as instruções 5 e 6 acima mencionadas.

SABORES

Morango (S), Melão (M), Baunilha (V), Menta (I), Tutti-Frutti (T)

ARMAZENAMENTO

Para uma melhor efetividade, recomenda-se guardar em uma área de baixa umidade, longe do sol e de luz e entre 8 e 25°C (46,4-77,0°F).

VENCIMENTO

Dois (2) anos a partir da data de fabricação. Veja na base do tubo a data de validade.

APRESENTAÇÃO

Tubo de 40 g (35ml)

NOTA

A fórmula exclusiva de MI Paste com RECALDENT™ (CPP-ACP) está disponível apenas com profissionais de odontologia. MI Paste não está à venda em farmácias, supermercados e outros estabelecimentos.

*CPP-ACP foi desenvolvido na The School of Dental Science, da Universidade de Melbourne, Victoria, Australia.

RECALDENT™ é uma marca comercial utilizada sob licença. CPP-ACP Technology tem patentes pendentes na Austrália, Nova Zelândia, Europa, Canadá e EUA.

PRECAUÇÃO

1. Retire o excesso de pasta no interior da tampa e da boca do tubo. Sempre feche o produto com sua tampa após o uso.
2. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água abundante e procure um médico.
3. Se derramado na roupa, lave com água.
4. Em caso de apresentar sintomas de angioedema, interrompa o uso imediatamente e consulte o um médico.
5. CUIDADO: RECALDENT™ (CPP-ACP) é derivado da caseína, a proteína do leite. Não utilizar em pacientes com alergias ou sensibilidades à proteína do leite ou conservantes hidroxibenzoatos.
6. Em caso de apresentar uma reação alérgica descontinue o uso imediatamente, cuspir o conteúdo imediatamente, lave a boca com água e procure um médico.

Última revisão: 07/2017

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:

<http://www.gcamerica.com/downloads>

Estas também podem ser obtidas através de seu distribuidor.

FABRICADO e DISTRIBUIDO por:

GC AMERICA INC.

3737 W. 127th Street

Alsip, IL 60803 EUA.

www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA

Rua Heliódora, 399, Santana - 02022-051

São Paulo, Sp - Brasil

Tel: +55-11-2925-0965

Cnpj: 08.279.999/0001-61

Responsável Técnica Mayara De Santis Ribeiro

Cro/sp: 105.982

PRINTED IN THE USA

IMPRESSO NOS EUA